

Anleitung Laparoskopie-Trainer (Surgicalscience-Simbionix)

Lehr- und Lernzentrum
Medizinische Fakultät Essen

Schritt 1: Positionierung des Gerätes

1.1

Den Laparoskopie-Trainer an der gewünschten Stelle im Raum platzieren und die beiliegende **Fußmatte** vor dem Trainer auslegen



Schritt 2: Strom anschließen

Im Boden finden sich Bodentanks



**Durch Aufklappen der Bodentanks
legt man die Steckdosen frei**



Schritt 2: Strom anschließen

**Den Stecker des Gerätes
einstecken**



**Den Tank wieder verschließen, die
Metallklappe bleibt aber offen**



Schritt 3: Gerät einschalten

**Strom am Gerät einschalten
(Schalter auf der Rückseite)**



**Betätigen des „On-Knopfes“
(Schalter auf der rechten Seite)**



Schritt 4: Falls der Bildschirm aus ist



4.1

**Einschalten des Bildschirms
durch Betätigen des
On-Knopfes.**

**Dieser befindet sich auf der
Rückseite des Bildschirms.**

Schritt 5: Anmeldung und Modulauswahl

5.1

Anmelden, um den Laparoskopie-Trainer zu verwenden. Dafür mit entsprechenden Anmeldedaten oder als Gast anmelden.

5.2

Nun das gewünschte Modul auswählen und mit der Bearbeitung beginnen.

Schritt 6: Elektrik Pedale



6.1

Sofern benötigt, die **Elektrik Pedale** auf der ausgelegten Fußmatte platzieren

Schritt 7: Aufsätze wechseln


7.1

Für verschiedene Module werden unterschiedliche Aufsätze benötigt. Neben den bereits eingespannten Aufsätzen finden sich weitere in der dafür vorgesehenen Halterung an der linken Seite des Trainers.

Schritt 7: Aufsätze wechseln


7.2

Um einen Aufsatz zu entfernen, muss man zunächst den **silbernen Knopf** drücken, dann kann der Aufsatz einfach herausgezogen werden.

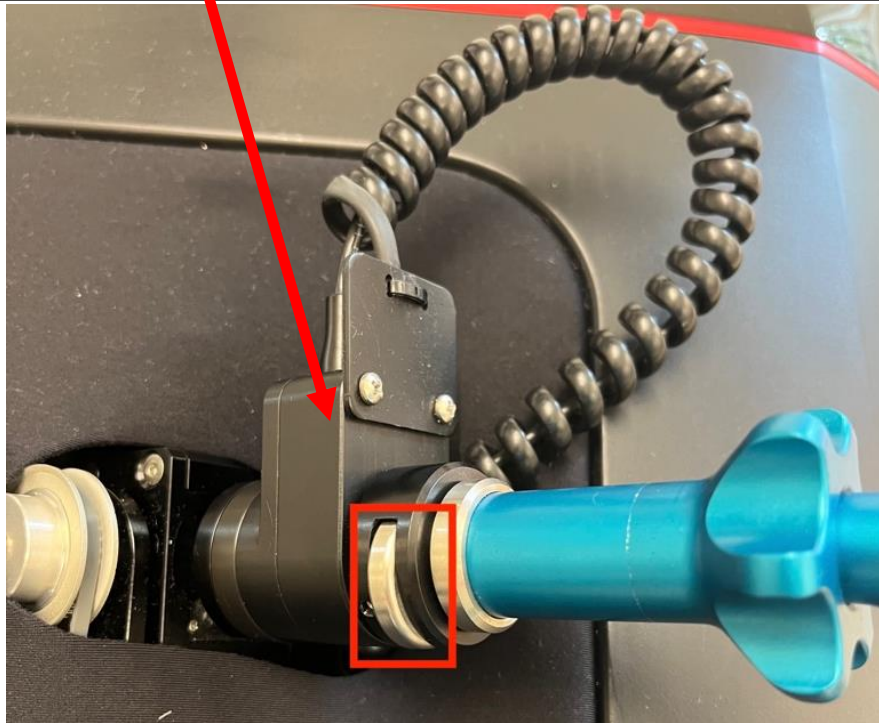

7.3

Um einen neuen Aufsatz anzuschließen, diesen einfach in das dafür vorgesehene **Loch** stecken.

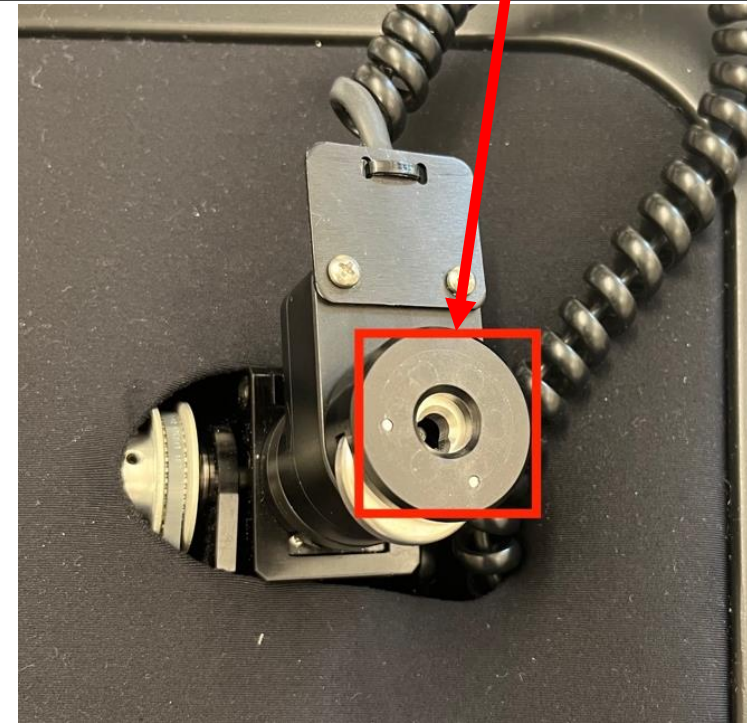

Schritt 4: Gerät ausschalten

- Nach Gebrauch zunächst ausloggen
- Anschließend den On-Knopf betätigen und den Strom-Schalter auf der Rückseite auf “Aus” stellen
- Sobald das Gerät heruntergefahren ist kann der Stecker gezogen werden

Schritt 5: korrektes Schließen der Bodentanks

So nicht!!



Sondern so!!

